



Poliresin[®]

Verarbeitungsanleitung

Mit Poliresin[®] wird die gleiche Poliertechnik angewendet wie beim Arbeiten mit Bimssteinpulver.

Anstelle von Wasser wird empfohlen eine Bimsdesinfektion zu verwenden. Im Poliertrog wird die Bimsdesinfektion vorgelegt und mit Poliresin[®] aufgefüllt bis ein Breigemisch entsteht. Das Gemisch sollte mit der Hand aufgenommen werden, ohne dass es zwischen den Fingern durchläuft damit eine gewisse Haftung auf dem zu polierendem Objekt gewährleistet wird.

Es ist darauf zu achten, dass die zu polierenden Kunststoffoberflächen immer wieder mit feuchtem Poliresin[®] benetzt werden um ein Überhitzen zu vermeiden.

Zur Vorpolitur können handelsübliche Bürsten verwendet werden. Meist reichen Leinenschwabbeln und Ziegenhaarbürsten aus, um eine starke Abrasion von unebenen Stellen und gleichzeitig eine äußerst glatte Oberfläche zu erzeugen.

Nun kann wie gewohnt die Hochglanzpolitur vorgenommen werden.

MR 07/2005